

## Медицинское изделие «Многофункциональный раствор для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health SiH в вариантах исполнения в составе»

Регистрационное удостоверение РЗН 2021/14379 от 20 мая 2021 года

### Производитель:

ДИСОП, С.А. (DISOP, S.A.), Авенида, Вальделапарра,  
31-А, Е-28108, Алькобендас, Мадрид, Испания,  
тел.: +34 916 612 244

По всем вопросам следует обращаться к уполномоченному представителю  
производителя ООО «НОВАЛЕКС»:

109028, г. Москва, пер. Ивановский М., дом 7-9, строение 1, Эт. 1 Помещение V, Ком. 10  
Тел. 8 (495) 419-17-87  
www.novalexgroup.ru

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Использование возможно после консультации с врачом-офтальмологом и изучения инструкции по применению. Не принимайте решения медицинского характера без предварительной консультации с медицинским работником. Конструктивные особенности раствора предусматривают его использование в домашних или аналогичных условиях непрофессионалом, поскольку выполнение назначения раствора не требует особых навыков и профессионального оборудования.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Для очистки, промывания, увлажнения, дезинфекции, смачивания и хранения мягких контактных линз. Предназначен для индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности.

### ОПИСАНИЕ

Многофункциональный раствор для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health SiH представляет собой буферный физиологический раствор с нейтральным pH, пригоден для контакта с глазами. В составе содержатся соответствующие дезинфицирующие и увлажняющие вещества для полноценного ухода за контактными линзами, благодаря чему использование других продуктов не требуется. При использовании Многофункционального раствора для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health SiH Ваши линзы остаются чистыми и комфортными, поскольку в его состав входят очищающие и увлажняющие средства. Если Вы оставите ваши линзы в контейнере на ночь, Hidro Health SiH устранил белковые и особенно эффективно липидные отложения, накопившиеся на контактной линзе. Данный раствор можно использовать с любым типом мягких контактных линз, включая силикон-гидрогелевые.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор показан к применению для очистки, промывания, увлажнения, дезинфекции, смачивания и хранения мягких контактных линз. Предназначен для индивидуального использования с соблюдением инструкции по применению и мер предосторожности и в соответствии с рекомендациями Вашего офтальмолога.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов раствора.

### ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Аллергические реакции на компоненты раствора. При возникновении побочных эффектов проконсультируйтесь с медицинским работником. Медицинское изделие является стерильным. Стерилизовано с использованием методов асептической обработки.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Всегда используйте свежий многофункциональный раствор. Вылейте раствор, оставшийся в контейнере для контактных линз с предыдущего дня.
- Держите бутылку плотно закрытой, при эксплуатации избегайте контакта пипетки с любой поверхностью.
- Убедитесь, что контрольное кольцо не сломано перед использованием продукта в первый раз. После вскрытия использовать в течение 90 суток.
- Храните раствор в недоступном для детей месте.
- Не используйте продукт, если у Вас аллергия на любой из его компонентов.
- В случае ощущения постоянного дискомфорта или раздражения, снимите линзы, прекратите использование раствора и обратитесь к специалисту по коррекции зрения.
- Линзы могут храниться в закрытом контейнере для контактных линз до 30 дней.
- Не пользуйтесь раствором с истекшим сроком годности.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Мойте руки перед работой с линзами и раствором.
2. Снимите одну из контактных линз и ополосните ее в течение нескольких секунд.
3. Добавьте три или четыре капли многофункционального раствора на линзу и очистите ее, протирая линзу в течение 20 секунд.
4. Налейте достаточно раствора в контейнер для контактных линз, чтобы линза была полностью покрыта жидкостью, а затем положите в него линзу.
5. Снимите другую контактную линзу и повторите тот же процесс.
6. Оставьте контактные линзы в закрытом контейнере на ночь или по крайней мере на 6 часов, чтобы достичь надлежащего обеззараживания и удалить белковые и липидные отложения.
7. Перед повторным использованием линзы ополосните ее в течение нескольких секунд раствором.

### ХРАНИЕНИЕ

Многофункциональный раствор для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health SiH должен храниться в отапливаемых помещениях при температуре от + 5°C до + 30°C, относительной влажности до 80 % и атмосферном давлении 700–1060 гПа и должны быть защищены от прямых солнечных лучей.

### СРОК ГОДНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Многофункциональный раствор для ухода за мягкими контактными линзами Hidro Health SiH, согласно исследованию устойчивости, отвечает требованиям спецификаций в течение 36 месяцев (3 лет).

Срок годности невскрытого МИ: 36 месяцев с даты производства. Вскрытый флакон с раствором использовать в течение 3 месяцев. Не использовать по истечении 3 месяцев после вскрытия.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства производителя распространяются на медицинское изделие до истечения срока годности, указанного на упаковке, при условии сохранения целостности упаковки и соблюдении условий транспортирования и хранения.

ЭКСПЛИКАЦИЯ СИМВОЛОВ, НАНЕСЕННЫХ НА ПЕРВИЧНУЮ УПАКОВКУ

СИМВОЛ				
ЗНАЧЕНИЕ	Знак лицензии переработки отходов упаковки	Номер лота МИ	Годен до	Европейский знак соответствия 0318
СИМВОЛ				
ЗНАЧЕНИЕ	Не допускать воздействие солнечного света	Стерилизация с применением методов асептической обработки	Производитель	Температурный диапазон
СИМВОЛ				
ЗНАЧЕНИЕ		Обратитесь к инструкции по применению	Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению	